


## ATTIVATORE PEDIATRICO

989803139311

L'attivatore pediatrico deve essere usato *esclusivamente* con il defibrillatore FRx HeartStart per il trattamento di un infante o di un bambino con peso inferiore a 25 kg o di età inferiore a 8 anni. Se non si è certi del peso preciso o dell'età esatta, applicare il defibrillatore *senza* l'attivatore pediatrico. Per le istruzioni relative all'utilizzo del defibrillatore FRx, fare riferimento al *Manuale per l'utente* del defibrillatore FRx o alla *Guida rapida di riferimento*.

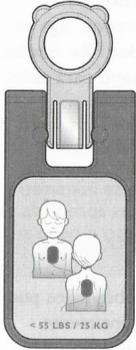

Attivatore pediatrico, parte anteriore.

**AVVERTENZA:** gli infanti e i bambini molto spesso non reagiscono a causa della respirazione o di altri problemi cardiaci.

- Mentre un assistente chiama il numero di emergenza, eseguire un minuto di rianimazione cardiopolmonare pediatrica.
- In assenza di assistenti, chiamare il numero di emergenza *dopo* aver eseguito la RCP per 1 minuto.
- Accendere il defibrillatore FRx HeartStart e installare l'attivatore pediatrico.
- In alternativa, seguire il protocollo locale.


Con l'attivatore pediatrico inserito, HeartStart FRx emette il messaggio "Modalità pazienti pediatrici", riduce automaticamente l'energia di defibrillazione e fornisce le istruzioni dettagliate opzionali, relative alla rianimazione cardiopolmonare pediatrica.

Non sono necessari elettrodi di defibrillazione particolari per utilizzare l'FRx HeartStart per il trattamento di un infante o di un bambino; gli elettrodi HeartStart SMART Pads II forniti con il defibrillatore sono stati ideati per un utilizzo su pazienti sia adulti che pediatrici.

**NOTA:** non importa se si inserisce l'attivatore pediatrico prima dell'accensione dell'FRx o immediatamente dopo l'accensione. Tuttavia, occorre inserire l'attivatore *prima* di posizionare gli elettrodi sul paziente. Se si rimuove l'attivatore pediatrico durante l'utilizzo, l'FRx emetterà il messaggio "Modalità adulto". Qualsiasi scarica erogata sarà di energia a livello adulto e le istruzioni opzionali relative alla RCP saranno per pazienti adulti.

### PER UTILIZZARE L'ATTIVATORE

Rimuovere l'attivatore pediatrico dalla sua custodia nella borsa per il trasporto.

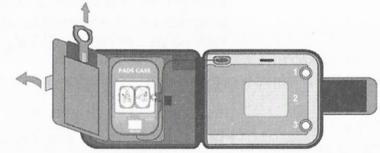


Inserire l'attivatore nello slot in alto al centro del pannello anteriore del defibrillatore FRx. Inserire l'attivatore come mostrato sulla parte posteriore dell'attivatore. La porzione rosa dell'attivatore gira (1) e si inserisce nello slot (2), con la parte anteriore dell'attivatore in posizione orizzontale sulla superficie dell'FRx in modo che risulti visibile lo schema di posizionamento degli elettrodi pediatrici.



Inserimento dell'attivatore.

I simboli degli elettrodi presenti sull'attivatore cominciano a lampeggiare quando si accende il defibrillatore e si inserisce l'attivatore.

**IMPORTANTE:** utilizzare la figura presente sull'attivatore pediatrico come guida per regolare il posizionamento degli elettrodi. Tale posizionamento è diverso da quello standard

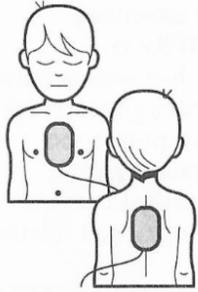

Posizionamento degli elettrodi quando si utilizza l'attivatore.

raffigurato sugli elettrodi per adulti e bambini di età superiore. Posizionare gli elettrodi, uno sul torace e l'altro sulla schiena. *Non importa quale elettrodo viene posizionato sul torace o quale sulla schiena.* Una volta posizionati gli elettrodi, i simboli relativi cesseranno di lampeggiare. Seguire le istruzioni vocali del defibrillatore FRx. Esso indicherà all'operatore ogni fase del suo utilizzo.

**ATTENZIONE:** non lasciare inserito l'attivatore pediatrico nel defibrillatore FRx quando non viene utilizzato in un'emergenza. Ciò causa l'emissione di un segnale acustico da parte dell'FRx. Inoltre, la bassa energia fornita quando si inserisce l'attivatore è adeguata esclusivamente al trattamento di pazienti con peso inferiore a 25 kg o di età inferiore a 8 anni.

**ADDESTRAMENTO.** È possibile utilizzare l'attivatore pediatrico con gli elettrodi per addestramento HeartStart Pads II per creare una simulazione per addestramento relativa al trattamento di infanti e bambini. L'RCP per infanti e bambini è diversa da quella per adulti. Si consiglia vivamente che qualsiasi persona in grado di utilizzare l'attivatore pediatrico venga addestrata nella rianimazione cardiopolmonare pediatrica.

**CONSERVAZIONE.** Conservare l'attivatore pediatrico nell'apposita tasca all'interno della borsa per il trasporto.

**MANUTENZIONE.** È possibile pulire l'attivatore pediatrico con un panno morbido, inumidito con acqua saponata, candeggina (2 cucchiaini ogni quarto di litro d'acqua), un detergente contenente ammoniaca o alcol isopropilico (soluzione al 70 %).